

# SARS-COV-2: UPDATE ZUR DIAGNOSTIK

Information zu Untersuchungsmaterial und Verpackung für SARS-CoV-2-Diagnostik

LI 2282

## Untersuchungsmaterial

Bitte schicken Sie uns für den SARS-CoV-2-Nachweis (RT-PCR) **einen Abstrich** (trockener Tupfer).


Bevorzugtes Untersuchungsmaterial:

### 1 Naso- oder Oropharyngealabstrich

(oder Kombination von beiden Entnahmeorten)

## Materialgewinnung


Tupfer vorsichtig bis zur hinteren Nasopharynx- bzw. Oropharynx-Wand einführen und mehrfach drehen:

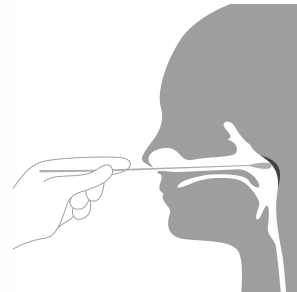

## Verpackung

Für den Transport des Untersuchungsmaterials empfehlen wir folgende Verpackung:

1. Tupfer in eine Plastiktüte geben
2. verpackten Tupfer in eine zweite Plastiktüte geben & Überweisungsschein mit in die äußere Tüte geben

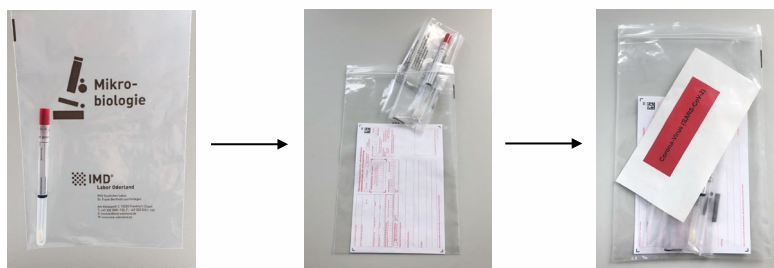

## Hinweis:

Wir führen keine Probenentnahmen bei Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion durch.

Bitte verzichten Sie darauf, Patienten mit dem Untersuchungsmaterial zum Labor zu schicken.

Bitte geben Sie die Proben dem Kurierfahrer mit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

**Dr. rer. nat. Antje Kröber**

**Dr. rer. nat. Nico Pietack**

**Dr. med. Frank Berthold**